

口腔ヘルスケア

# 入れ歯抗菌剤「ピカパワー」

新発売

入れ歯のにおい・ヌメリ  
気になりませんか？

においやぬめりを軽減させる  
ことができます。

## 使用方法

- ① 入れ歯洗浄剤で洗浄してください。
- ② 洗浄後、水でよくすすいでください。
- ③ 同封の水溶液を入れ歯ケースに入れてください。
- ④ その中に、1つの入れ歯全体を水面から出ないように入れてください。
- ⑤ ご家庭の電子レンジ（1KW以下）で1分間加熱してください。
- ⑥ 入れ歯を水でよくすすぎ、水溶液はすぐに捨ててください。



今使っている入れ歯にも  
使えるのかしら？

はい。大丈夫です！  
ご家庭で簡単に「抗菌入れ  
歯」にすることができます。

日頃お使いの入れ歯には、細菌が  
数千億個付着しています。  
これが口臭や全身の疾患にとっても影  
響がある義歯性カンジダ症の原因に  
なっています。

「ピカパワー」には、病原性細菌の  
付着を防止する力があります！

ウイルス不活化！

内容量 150ml  
定 価 2,500円（消費税・送料別）

抗菌科学を追求する

 株式会社 **ピカパワー**<sup>®</sup>  
<http://kohkin.biz>