

口腔ヘルスケア

入れ歯抗菌剤「ピカパワー」

新発売

入れ歯のにおい・ヌメリ
気になりませんか？

においやぬめりを軽減させる
ことができます。

使用方法

1. 入れ歯洗浄剤で洗浄し、洗浄後は水でよくすすいでください。
2. 切口より封を切り1つの入れ歯を水面から出ないように入れてください。
3. 必ず立てて電子レンジ（1000w以下）の中央に置き1分間加熱してください。
※横にすると中身がこぼれます。
※2個以上まとめて加熱はおやめください。
4. 加熱後、袋を立てたまま取り出してください。
5. 入れ歯を水でよくすすぎ、水溶液はすぐ捨ててください。



今使っている入れ歯にも
使えるのかしら？

はい。大丈夫です！
ご家庭で簡単に「抗菌入れ
歯」にすることができます。

日頃お使いの入れ歯には、細菌が
数千億個付着しています。
これが口臭や全身の疾患にとっても影
響がある義歯性カンジダ症の原因に
なっています。

「ピカパワー」には、病原性細菌の
付着を防止する力があります！

ウイルス不活化！

内容量 150ml
定 価 2,500円（消費税・送料別）

抗菌科学を追求する

株式会社ピカパワー®

<http://kohkin.biz>