

口腔ヘルスケア

入れ歯抗菌剤「ピカパワー」

新発売

入れ歯のにおい・ヌメリ
気になりませんか？

においやぬめりを軽減させる
ことができます。

日頃お使いの入れ歯には、細菌が
数千億個付着しています。
これが口臭や全身の疾患にとっても影
響がある義歯性カンジダ症の原因に
なっています。
「ピカパワー」には、病原性細菌の
付着を防止する力があります！

2月29日まで、定価から
さらに2割引きの2,000円
(税・送料別)でお試
しいただくことができます。
この機会にぜひ！！

なんと！



内容量 150ml
定 価 2,500円 (消費税・送料別)

今使っている入れ歯にも
使えるのかしら？

はい。大丈夫です！
ご家庭で簡単に「抗菌入れ
歯」にすることができます。

使用方法

- ① 入れ歯洗浄剤で洗浄してください。
- ② 洗浄後、水でよくすすいでください。
- ③ 同封の水溶液を入れ歯ケースに入れてください。
- ④ その中に、1つの入れ歯全体を水面から出ないように入れてください。
- ⑤ ご家庭の電子レンジ（1KW以下）で1分間加熱してください。
- ⑥ 入れ歯を水でよくすすぎ、水溶液はすぐに捨ててください。

抗菌科学を追求する

 株式会社 **ピカパワー**[®]
<http://kohkin.biz>