

## 3ヶ月後の抗菌試験


1試験片あたりのカンジダ生菌数 (cfu)			
初発接種菌数	室温3ヶ月月経過		
	未加工レジン	ピカパワー加工レジン	対照ポリプロピレンフィルム
$6.3 \times 10$ cfu	$1.1 \times 10$ cfu	< 10cfu 検出せず	$1.5 \times 10$ cfu

(試験片 義歯床材料アクリルレジン)

検出限界値 10cfu

## 義歯床用レジン曲げ強度試験

試料名	曲げ強度 [MPa]	曲げ弾性率 [GPa]	備考
1	89.8	2.76	未加工
3	86.3	2.84	ピカパワー加工

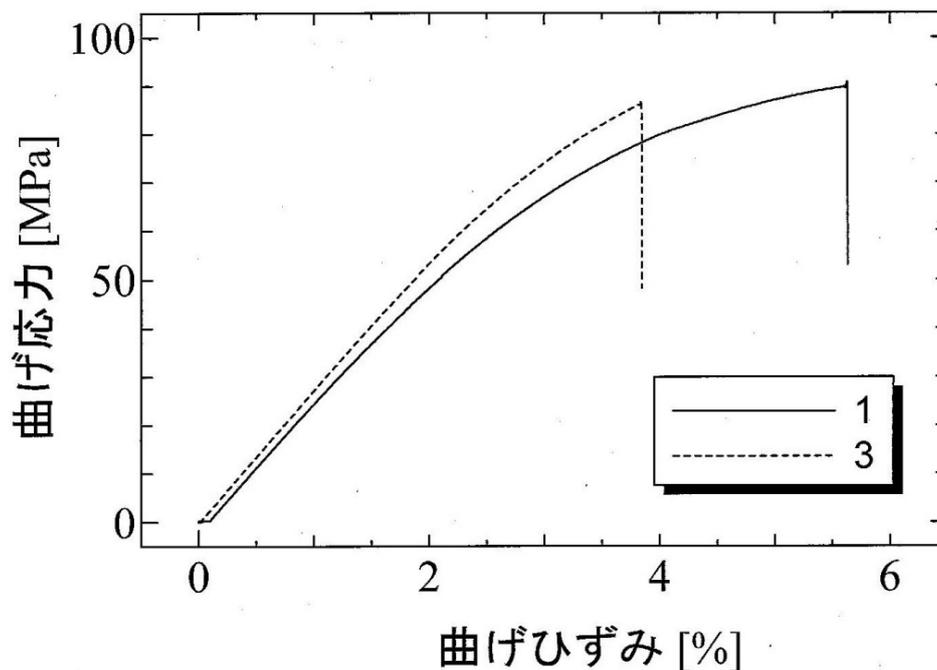

硬くなる